



Hinweise zu Lagerung und Versand von Hygieneproben

Vorbemerkungen

- Probenmaterial bei Eingang sowie vor Gebrauch auf Unversehrtheit und Mindesthaltbarkeitsdatum prüfen
 - beschädigte bzw. abgelaufene Materialien in den Hausmüll entsorgen
 - Rückinformation an Mitarbeiter des Hygienelabors (Telefon **0391/24468240**) zwecks kostenfreier Neuzustellung des benötigten Materials

Probenlagerung

- Lagerung des Materials grundsätzlich trocken sowie staub- und lichtgeschützt

Material	Lagertemperatur <u>vor</u> Probenentnahme	Lagertemperatur <u>nach</u> Probenentnahme
Abklatschplatten	2 – 25 °C	2 – 8 °C
e-Swab Abstrichtupfer	Raumtemperatur	2 – 8 °C
Sedimentationsplatten	2 – 8 °C	2 – 8 °C
Probengefäße für Flüssigkeitsproben	Raumtemperatur	2 – 8 °C
Bioindikatoren	Raumtemperatur	Raumtemperatur

Probentransport

- Probenmaterial nach Entnahme so zeitnah wie möglich zur Weiterverarbeitung in das Labor schicken
- Probengefäße fest verschließen; Agarplatten (Deckel + Boden) möglichst mit Klebeband fixieren, um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Platten während des Transports zu verhindern
- auf vollständige und eindeutige Beschriftung der Probe und des Probenbegleitscheins achten
- Transport des Materials in einer stoßfesten, auslaufsicheren Umverpackung (z.B. Karton + Kunststofftüte, Kunststoffbox o.Ä.)
- Rücktransport durch Einsender und Abgabe zu den Annahmezeiten des Labors:
Montag bis Freitag 07:00 - 18:00 Uhr
- alternativ Abholung vor Ort und Rücktransport durch Laborkurier (nur nach Rücksprache mit Mitarbeitern des Hygienelabors, Telefon 0391/24468240)

Ihr Spezialist für Labormedizin