




Für ein schnelles Ergebnis brauchen wir Ihre Unterstützung

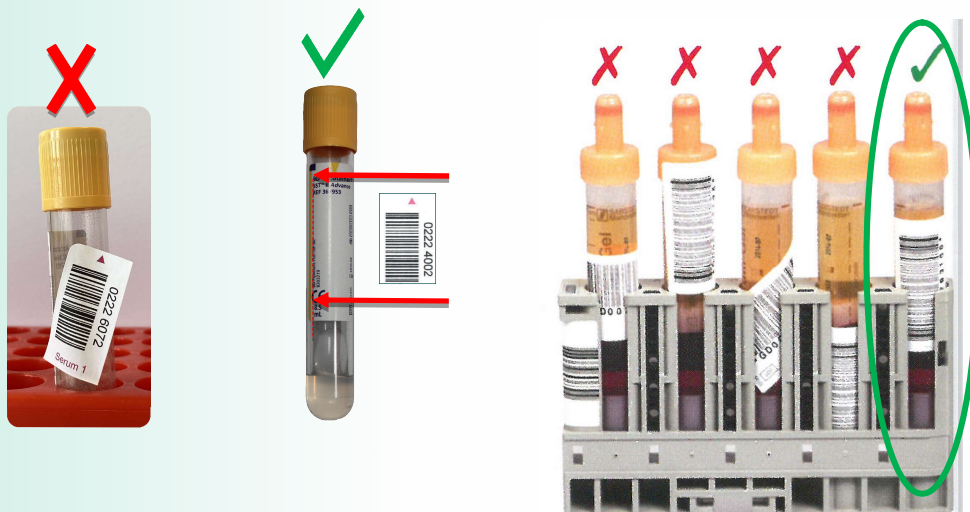

Mit einer korrekten Vorbereitung der Probenröhrchen in der Praxis, unterstützen Sie uns, Ihre Proben zeitnah und so schnell wie möglich zu bearbeiten.

Trocken lagern

- Die Barcodeetiketten bitte trocken bei Raumtemperatur (nicht in der Nähe von Heizkörpern) lagern.

Papier auf Papier

- Bitte kleben Sie dazu **ein** Barcodeetikett auf das schon vorhandene Papieretikett des Röhrchens und **drücken Sie dieses bitte fest an** (einmal über das komplette Klebchen streichen). Auf der glatten Seite können sich die Barcodeetiketten leicht ablösen und mitunter kann die Probe nicht zugeordnet werden. Das ist für Sie und Ihre Patienten ärgerlich.

Hintergrund

Der in der Praxis vergebene Barcode wird von unseren Geräten automatisch gelesen. Ein nicht korrekt beklebtes Probenröhrchen kann nicht sofort in den Arbeitskreislauf einfließen, und der Barcode muss von den MitarbeiterInnen abgelöst und manuell neu beklebt werden. Dies verzögert die Fertigstellung Ihres Befundes.

Handhabung der Urinmonovetten

- Urinmonovetten bitte nur mit **max. 10 ml** Urin befüllen!
- alle zu voll gefüllten Monovetten müssen manuell abgekippt werden, damit die Geräte den Füllstand korrekt ermitteln können

